

Nebulizadores a Pistón

BC68001
BC68002
BC68005
BC68006

Manual del Usuario

Fecha última versión: 12/2021

INTRODUCCION


El Nebulizador a Pistón FEMMTO BC 68001/2/5/6 se utiliza para administrar medicación en forma de aerosol a pacientes adultos y pediátricos. Principalmente es utilizado para el tratamiento en pacientes de traqueítis, bronquitis, asma y demás enfermedades respiratorias que requieran el suministro de medicación en forma de aerosol.

IMPORTANTE

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este equipo.

COMPONENTES DEL NEBULIZADOR



- 1.Unidad nebulizadora
- 2.Interruptor I/O - ON/OFF
- 3.Rejillas de ventilación
- 4.Soporte para KIT nebulizador (pipeta)
- 5.Salida de aire
- 6.Portafiltros
- 7.Etiqueta FEMMTO
- 8.Conector cable de alimentación

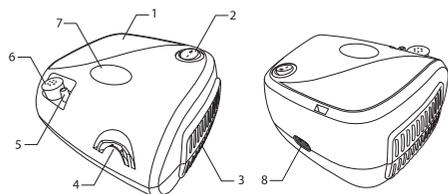

*FEMMTO BC68001


ACCESORIOS ESTANDAR

- 1.KIT nebulizador (Pipeta nebulizadora)
- 2.Boquilla
- 3.Tubo de aire
- 4.Máscara para adultos
- 5.Mascarilla pediátrica
- 6.Filtro de aire (5 piezas)

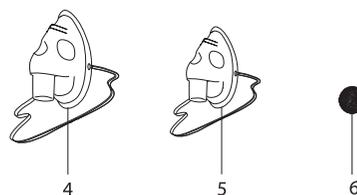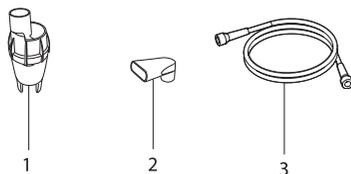

* Modelos FEMMTO BC 68001/2/5/6

FEMMTO BC68006 (Nebulizador Compacto USB)

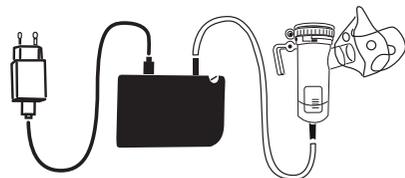

* El modelo FEMMTO BC68006 es un nebulizador portátil ultracompacto con un peso aproximado de 157 gr; el mismo cuenta con una fuente de 5V y salida de USB. Cuenta con todos los accesorios estándar mencionados en el apartado anterior.

ADVERTENCIAS DE USO

- 1.Para el tipo, la dosis y el régimen del medicamento, siga las instrucciones de su médico.
- 2.Si siente algo inusual durante el uso del dispositivo, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte

con su médico.

- 3.No cubra el compresor con una sábana, toalla o cualquier otro tipo de cobertura durante su uso. Esto puede provocar recalentamiento o mal funcionamiento del compresor.
- 4.No use el dispositivo en lugares donde pueda estar expuesto a vapores o gases inflamables.
- 5.No use agua mineral o agua de la llave en el nebulizador para fines de inhalación.
- 6.Limpie y desinfecte el kit nebulizador, la boquilla y las mascarillas antes de usarlos por primera vez después de la compra.
- 7.Si el dispositivo no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo o si más de una persona utiliza el mismo dispositivo, limpie y desinfecte el kit nebulizador, la boquilla y las mascarillas antes de utilizarlos.
- 8.La **Pentamidina** no es un medicamento aprobado para utilizar en este dispositivo.
- 9.Siempre deseche el medicamento que queda en el recipiente después de cada uso.
- 10.Utilice un medicamento nuevo cada vez que use el dispositivo.
- 11.No deje el dispositivo ni sus piezas en lugares que estén expuestos a temperaturas extremas o a cambios en la humedad, como por ejemplo en un vehículo durante los meses de calor o donde quede expuesto a la luz directa del sol.
- 12.No use ni guarde el dispositivo en lugares donde pueda estar expuesto a gases nocivos o sustancias volátiles.
- 13.Asegúrese de que el kit nebulizador esté limpio antes de utilizarlo.
- 14.No utilizar en circuitos anestésicos ni de respiración por ventilación.
- 15.El uso no es adecuado en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.
- 16.No lo ponga en funcionamiento en un entorno cerrado donde se administre oxígeno (como una carpa de oxígeno).

CONTRAINDICACIONES

Este producto no está indicado para ser utilizado por:

1. Personas que padezcan epilepsia, ya que

padeciendo un ataque repentino puedan morder los accesorios e ingerir algunas de sus partes.


2. Sujetos con enfermedades del tracto nasofaríngeo en las que la humidificación del aerosol pudiera retrasar la curación de sus lesiones.
3. Personas que por razones naturales o accidentales tengan una conformación facial que no permita el uso adecuado de los accesorios.

INSTRUCCIONES DE USO


Retire el compresor del estuche de transporte o caja contenedora antes de usarlo.

Examine la unidad antes del primer uso para verificar posibles daños durante el envío. Al tomar un tratamiento, siéntese erguido y relajado.


1. Después de desembalar el dispositivo, compruebe si el compresor y los accesorios presentan daños o defectos visibles, como grietas en la carcasa de plástico que podrían exponer los componentes eléctricos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de **DISBYTE S.A.** para informar sobre cualquier producto dañado.
2. Antes de utilizar el dispositivo, proceda con las operaciones de limpieza descritas en la sección "Limpieza y desinfección de los accesorios".
3. Abra el nebulizador girando la parte superior en sentido antihorario.
4. Asegúrese de que el deflector esté colocado correctamente dentro de la cámara del nebulizador.
5. Ponga la cantidad prescrita de medicamento en el recipiente para medicamentos. El volumen máximo de llenado es de **6 ml**.
6. Cierre el KIT nebulizador sosteniendo la parte inferior y girando la parte superior en el sentido de las agujas del reloj, asegurándose de que la unidad esté completamente cerrada.

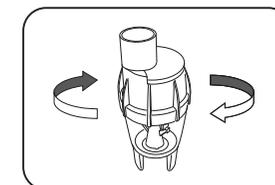


7. Conecte un extremo del tubo de aire al nebulizador y el otro extremo a la salida de aire del dispositivo.

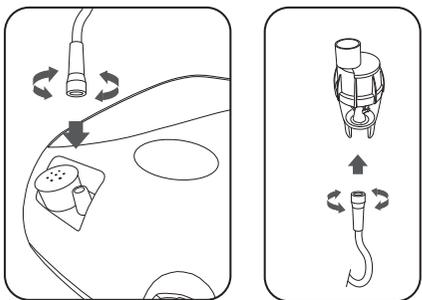

8. Conecte la boquilla en ángulo al nebulizador.
9. Si usa la máscara, retire la boquilla en ángulo y conecte la máscara directamente al nebulizador.

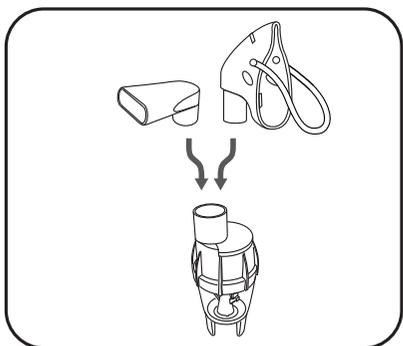

10. Enchufe el compresor en el tomacorriente, asegurándose de que la clasificación eléctrica que se muestra en la placa de clasificación en la parte inferior de la unidad corresponda con su voltaje principal.

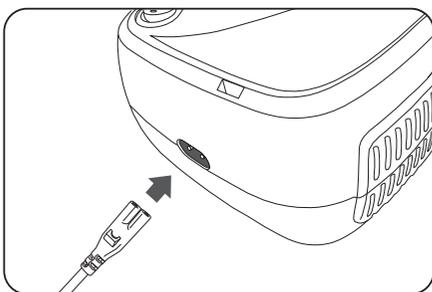

11. Para iniciar el tratamiento, encienda el dispositivo presionando el interruptor ON / OFF en la posición "I".

ATENCIÓN ⚠

Este dispositivo está clasificado para uso intermitente 30 minutos ENCENDIDO / 30 minutos APAGADO.

12. Cuando se haya completado el tratamiento, apague la unidad colocando la posición del interruptor en "O" y desconecte el enchufe del tomacorriente.

13. Lave el nebulizador y los accesorios como se describe en la sección "Limpieza y desinfección de los accesorios".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Información general

- Los accesorios del nebulizador son para uso personal solamente. No comparta el uso de los accesorios con otros pacientes
- Excepto el tubo de aire, todos los accesorios del nebulizador pueden ser lavados y desinfectados
- La temperatura de limpieza y desinfección no puede exceder los 38°C.

Antes de cada uso (incluido el primer uso)

- Desmontar todos los accesorios y enjuagar cada pieza con agua del grifo (excepto el tubo de aire)
- Colocar los accesorios en un recipiente y luego llenar con agua tibia con jabón hasta la parte superior. Lavar y enjuagar con agua limpia.
- Colocar los accesorios en un esterilizador de vapor para desinfectar durante 5 minutos. El esterilizador no debe ser del tipo de vapor a presión. Si no hay un esterilizador, desinfectar con agua caliente (no exceder los 38°C).
- Sacar los accesorios y secar con una toalla limpia o dejar que se sequen al aire.

Después de cada uso

- Limpiar los accesorios. Lavar con agua jabonosa

tibia y enjuagar con agua limpia

- Para cuidar los accesorios y que estos mantengan una buena higiene, se sugiere poner los mismos en un recipiente con tapa o en una bolsa de plástico sellada hasta el próximo uso.

Es importante seguir cuidadosamente las instrucciones de limpieza para garantizar un funcionamiento óptimo.

Mantenimiento

El KIT nebulizador o pipeta nebulizadora debe reemplazarse después de un largo período de inactividad, o si está obstruido por medicación seca, polvo, etc. Con un uso normal, esta pieza debe durar al menos 6 meses.

El filtro debe reemplazarse después de aproximadamente 30 horas de uso o cuando parezca estar sucio. Abra el portafiltros para reemplazar el filtro por uno nuevo. Utilice únicamente filtros originales. Esta unidad trae 5 filtros de reemplazo.

No utilice el dispositivo sin el filtro

Nunca abra el dispositivo. No hay piezas reparables dentro de la unidad. El compresor no requiere lubricación ni mantenimiento.

PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES

El dispositivo no se enciende

1. Asegúrese de que el enchufe esté firmemente insertado en el tomacorriente.
2. Asegúrese de que el dispositivo haya estado funcionando dentro de los límites operativos indicados en este manual de instrucciones (30 minutos ENCENDIDO / 30 minutos APAGADO.)

El dispositivo no nebuliza o la nebulización es débil

1. Asegúrese de que los extremos del tubo de aire estén bien ajustados a la unidad principal y al nebulizador.
2. Verifique si el nebulizador está vacío de medicamento o sobrecargado de medicamento (el llenado máximo es de 6 ml)
3. Compruebe si la boquilla del nebulizador está obstruida.
4. Compruebe si el deflector está insertado correctamente.

Servicio post venta

DISBYTE S.A. en su carácter de importador, garantiza este producto por el término de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de compra asentada en esta garantía y acompañada de la factura de compra.

1) Dicha garantía no es válida en caso de mal funcionamiento causado por razones personales, como se detalla a continuación:

- Por el desarme y modificación del producto.
- Por una caída al recoger el producto o al utilizarlo.
- Por el uso inapropiado o la falta de cuidado razonable.
- Por utilizar el producto sin seguir el manual de instrucciones.
- Por desastres naturales, como inundación o incendio.
- Por reparación realizada por fabricante no autorizado.

2) Si necesita servicio técnico sin costo, presente la garantía y la factura de compra.

3) Para dicho servicio, pónganse en contacto con los técnicos autorizados.

4) En caso de necesitar servicio técnico, puede proporcionar información sobre los componentes del producto para circuitos de esquemas y reparación, identificados por nuestro personal técnico calificado.

5) Al reparar algunas fallas con nuestro servicio técnico, tendremos en cuenta los recargos razonables.



FOSHAN HONGFENG CO., LTD.
NO.4-2 LEQIANG ROAD, LEPING SANSHUI
Foshan Guangdong, CN 528100, China

¿Necesitas ayuda?



hola@femmto.com